

medi Arm Butler

Gebrauchshinweise

Legen Sie eine rutschfeste Unterlage unter den medi Arm Butler (z. B. ein Schwammtuch oder einen gummierten Stoff).



1. Stellen Sie den medi Arm Butler auf einen Tisch oder ähnliches.

medi Tipp: Legen Sie unter den medi Butler eine rutschfeste Unterlage (z. B. Schwammtuch, gummierter Stoff etc.).



2. Stülpen Sie den Armstrumpf über den halbrunden Zylinder. Bitte achten Sie darauf, dass die Nahtführung nicht mittig auf Sie zuläuft, sondern leicht versetzt wird. Armversorgungen für den rechten Arm – nach rechts außen (ca. 16:00h). Armversorgungen für den linken Arm – nach links außen (ca. 20:00h).
-



3. Legen Sie den medi Arm Butler nun um. Zur Stabilisierung wird der vordere Winkel an der Vorderseite eines Tisches angelegt.
-



4.
Strecken Sie jetzt Ihre Hand in die Öffnung.
Achten Sie bitte darauf, mit der anderen
Hand die Manschette am Butler sorgfältig
festzuhalten.



5.
Führen Sie den Arm gleichmäßig, ohne ihn zu
drehen, in den Armstrumpf.



6.
Kontrollieren Sie nochmals den richtigen Sitz
des Armstrumpfes und klappen ggf. das
Haftband oder die Befestigung hoch.
